



Höchster Anwendungskomfort

D-WIPES

Wischtücher im wiederbefüllbaren Spendersystem

Wirkstoffabgabe und Desinfektionswirkung umfangreich getestet

- **trockene Wischtücher zur Tränkung mit Desinfektionsmitteln**
- **einfache und sichere Entnahme durch wiederverschließbares Spendersystem**
- **universell einsetzbar**

Eigenschaften

Trockene Wischtücher zur Tränkung mit Reinigungs- oder Flächendesinfektionsmitteln zur schnellen und unkomplizierten Reinigung und Desinfektion von Flächen und Medizinprodukten. Die Tücher sind aus qualitativ hochwertigem, fusselfreiem Vliesstoff. Sie können sowohl in Kombination mit gebrauchsfertigen Schnelldesinfektionsmitteln als auch mit der gebrauchsfertigen Anwendungslösung von Desinfektionsmittelkonzentraten verwendet werden. **D-Wipes** wurden speziell für die Reinigung und Flächendesinfektion entwickelt. Sie gewährleisten eine hervorragende Benetzung der Flächen und besitzen ein ausgezeichnetes Schmutztragevermögen.

D-Wipes können aus einem eigens dafür konzipierten **D-Wipes** Feuchttuchspender entnommen werden. Die Entnahme erfolgt aus einem sehr praktikablen, wiederverschließbaren Spendersystem. Die Anwendungslösung wird somit durch das geschlossene System vor externer Kontamination und Verdunstung geschützt. Die mit Desinfektionsmittel getränkten Tücher sind über einen Zeitraum von 28 Tagen verwendbar. **D-Wipes** sind mit allen handelsüblichen Desinfektionsmitteln kombinierbar.

D-Wipes Feuchttuchspender

Ein speziell für die Herstellung, hygienische Aufbewahrung und Entnahme der feuchten Tücher konzipierter Spendereimer aus Polyethylen und Polypropylen. Die Entnahme erfolgt aus einem speziell für diese Anwendung konzipierten, absolut dichten, wiederverschließbaren Tuchspendersystem. Der Feuchttuchspender ist beständig gegenüber Desinfektionsmitteln sowie spülmaschinenfest bis 60 °C.

Anwendung

2,5 - 3* Liter gebrauchsfertige Anwendungslösung des gewünschten Reinigungs- bzw. Desinfektionsmittels herstellen (Anwendungskonzentrationen und Einwirkzeit den Herstellerangaben entnehmen).

Anschließend erfolgt die Tränkung der Tücher im Spendereimer mit 2,5 - 3* Litern der Gebrauchslösung des Reinigungsmittel- bzw. Desinfektionsmittelkonzentrates oder des gebrauchsfertigen alkoholischen Desinfektionsmittels. Nach 30-60 Min. sind die Tücher vollständig getränkt und können verwendet werden.

Flächen und Gegenstände sorgfältig abwischen.

Einwirkzeit des Reinigungs- bzw. Desinfektionsmittels beachten!

Zusammensetzung

1 Rolle besteht aus 100 bzw. 50 Wischtüchern à 32 cm x 30 cm, trocken, aus hochqualitativem, fusselfreiem Vlies. 100% Kunstfaser-Mischung.

Dosierhilfen

Wandhalter

Produktstatus

Entspricht der EU-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte.

Die Präparate der DESOMED – einsetzbar in Verbindung mit den D-WIPES:

Flächenwischdesinfektion:

- **BIGUAMED® PERFEKT N**
- **DESOTOP**
- **DESOMED® PERFEKT**

Schnelldesinfektion:

- **DESOMED® RAPID AF**
- **DESOMED® RAPID PUR**
- **DESOMED® RAPID UNIVERSAL**

D-WIPES

Wischtücher im wiederbefüllbaren Spendersystem

D-Wipes sind einzeln abreibar und sollten einzeln aus der Applikationsöffnung entnommen werden. Nachfolgende Tücher sind durch die große Auf-fangschale mit Deckel des Spendersystems sicher geschützt.
Spezielle Etiketten, die die Dokumentation von Charge, Ansatz- und Verfall-datum des entsprechenden Desinfektions- bzw. Reinigungsmittels erleichtern, sind jeder Vliesrolle beigelegt.

*für die 50 Blatt Rolle: Tränkmenge 1 - 1,5 L

Gutachten

Dr. Brill, Hygieniker, Hamburg:
Prüfung der mikrobiologischen Stabilität/Standzeit von Biguamed Perfekt N, Desotop, Desomed Perfekt, Desomed Rapid AF, Desomed Rapid Pur, Desomed Rapid Universal in Kombination mit dem Vliesstoffsystem D-Wipes, 05.2010.

Dr. Wecker, Desomed Dr. Trippen GmbH, Freiburg:
Eignung des Vliestuchmaterials von D-Wipes zur Tränkung mit Flächendesinfek-tionsmitteln.

Gebindegröße	VE	PZN	EAN Gebinde	Artikelnummer
1 Rolle à 100 Blatt	6	-	4260055043995	DT-915-RDW10006
1 Rolle à 50 Blatt	3	-	4260055044008	DT-915-RDW5003
1 Spendereimer	6	-	4260055043704	DT-915-EDW006
1 Spendereimer	1	-	-	DT-915-EDW001
1 Spendereimer eckig mit Deckel weiß eckig mit Entnahmeöffnung blau	1	-	-	DT-915-EDW001-01
WANDHALTER FT	1	-	4260055042868	00-902-EIM
Artikelnummer	Deckelvarianten f. eckigen Eimer			
EIM-OT05WB06	Deckel weiß eckig mit Entnahmeöffnung blau			
EIM-OT05WRO06	Deckel weiß eckig mit Entnahmeöffnung rot			
EIM-OT05WE06	Deckel weiß eckig mit Entnahmeöffnung weiss			
EIM-OT05WGR06	Deckel weiß eckig mit Entnahmeöffnung grün			
EIM-OT05WG06	Deckel weiß eckig mit Entnahmeöffnung gelb			
Artikelnummer	Deckelvarianten f. runder Eimer			
EIM-OT05WRO01	Deckel weiß rund mit Entnahmeöffnung rot			
EIM-OT05WB01	Deckel weiß rund mit Entnahmeöffnung blau			
EIM-OT05WE01	Deckel weiß rund mit Entnahmeöffnung weiß			
EIM-OT05WGR01	Deckel weiß rund mit Entnahmeöffnung grün			
EIM-OT05WGE01	Deckel weiß rund mit Entnahmeöffnung weiß			